


NÄHANLEITUNG

Atemschutzmasken



LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung

Nähanleitung für einen Mehrweg- Mund- Nasen- Schutz

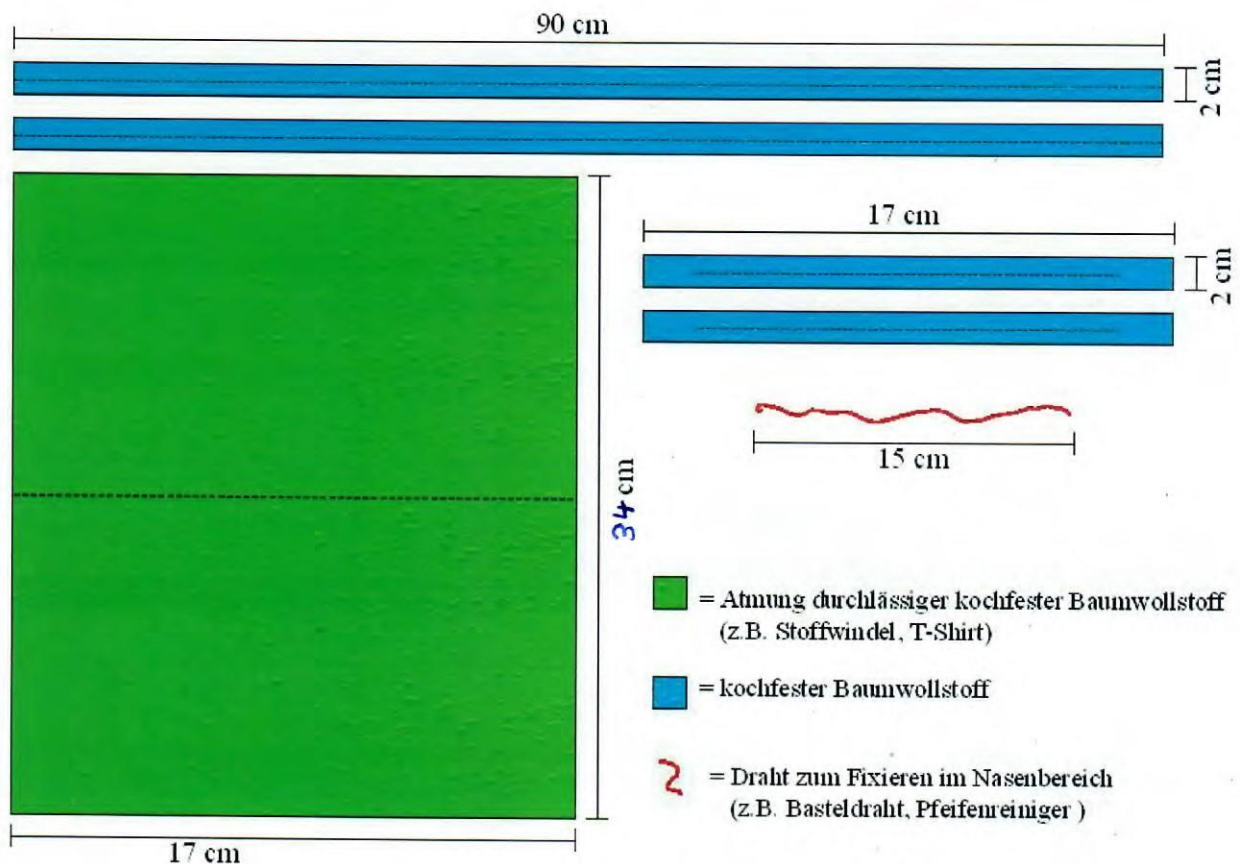

Folgende Materialien werden benötigt:


1. zwei 90 cm lange und 2 cm breite Stoffstreifen (kochfeste Baumwolle)
2. zwei 17 cm lange und 2 cm breite Stoffstreifen (kochfeste Baumwolle)
3. einen 15 cm langen dünnen und biegsamen Draht (z.B. Basteldraht, Pfeifenreiniger, Klemmdraht von Gefrierbeuteln)
4. 17 cm x 34 cm großes Stofftuch aus Atmungsdurchlässigem kochfestem Baumwollstoff (z.B. Stoffwindel, T-Shirtstoff, leichtes Baumwolltuch)

Prüfung der Durchlässigkeit der Atmung:


- Tuch doppelt nehmen
- Dicht um Mund und Nase schließen
- Ein- und Ausatmen

Ist das Ein- und Ausatmen ohne größeren Atemwiderstand möglich, ist das Material als Mundschutz geeignet!

LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung

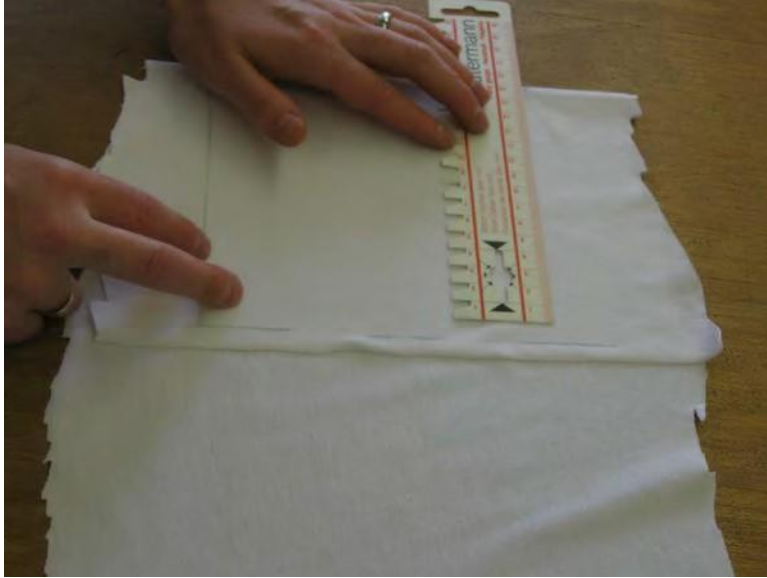

17x34 cm großes Stofftuch
anzeichnen und
ausschneiden

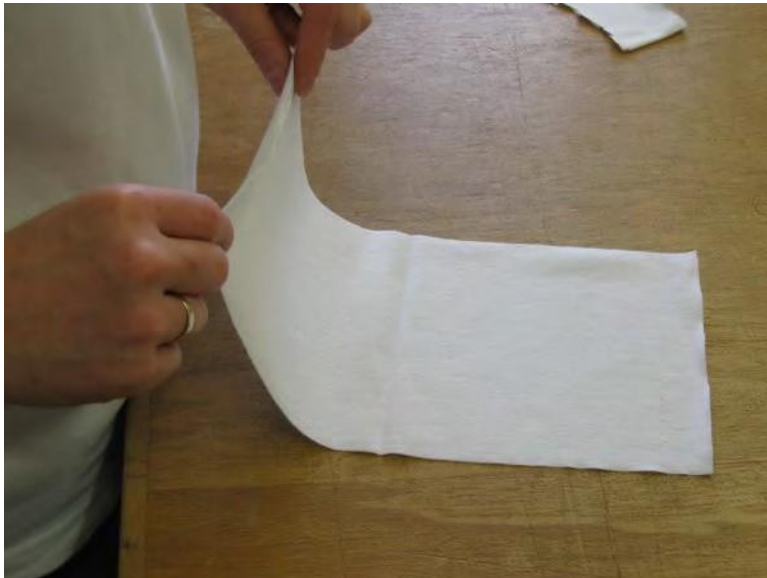


Stofftuch zur Hälfte falten und
bügeln



In das Stofftuch 3 gleichmäßig
verteilte Falten bügeln
(Faltentiefe 1,3 cm)

LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung

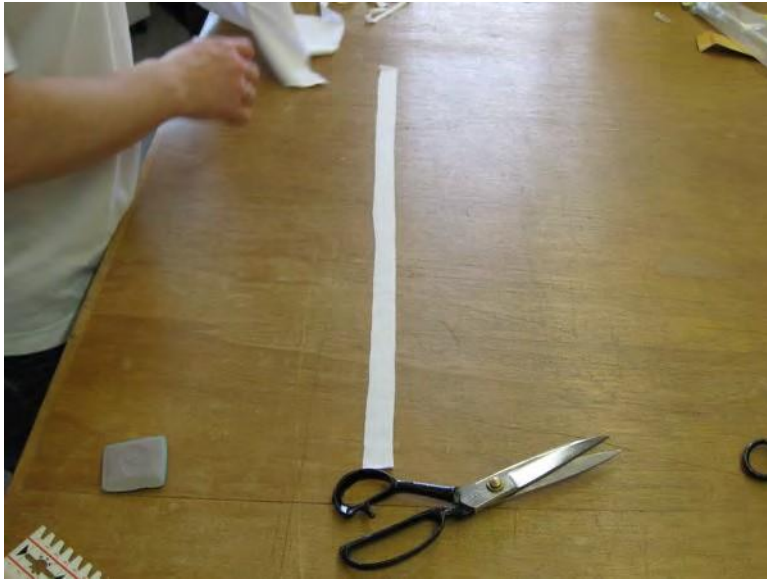


Zwei 90 cm lange und 2 cm breite Streifen (Kopfbänder) und zwei 17 cm lange und 2 cm breite Streifen (Kantenverstärkung) aus Baumwollstoff ausschneiden. Evtl. versäubern




Alle vier Streifen zur Hälfte bügeln (Schrägstreifen)




LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung

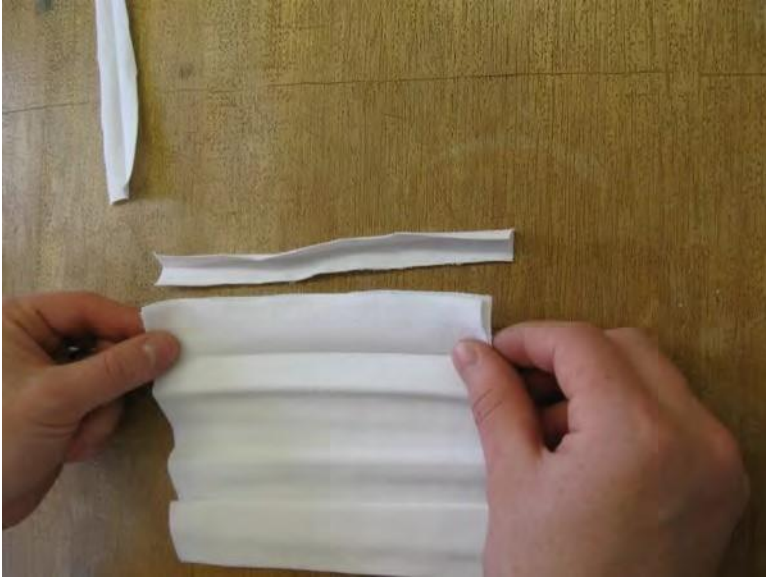

Stofftuch oben und unten in die Kantenverstärkungen einlegen

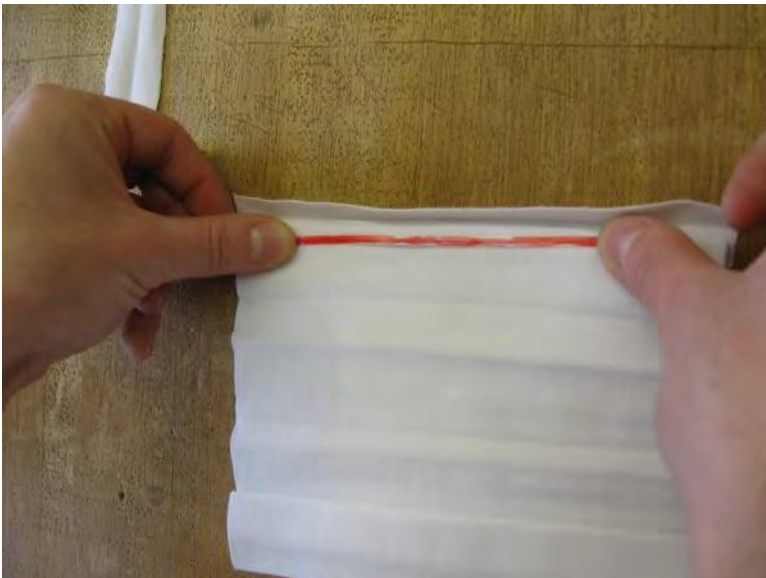

Am Oberteil Draht in die Kantenverstärkung einlegen

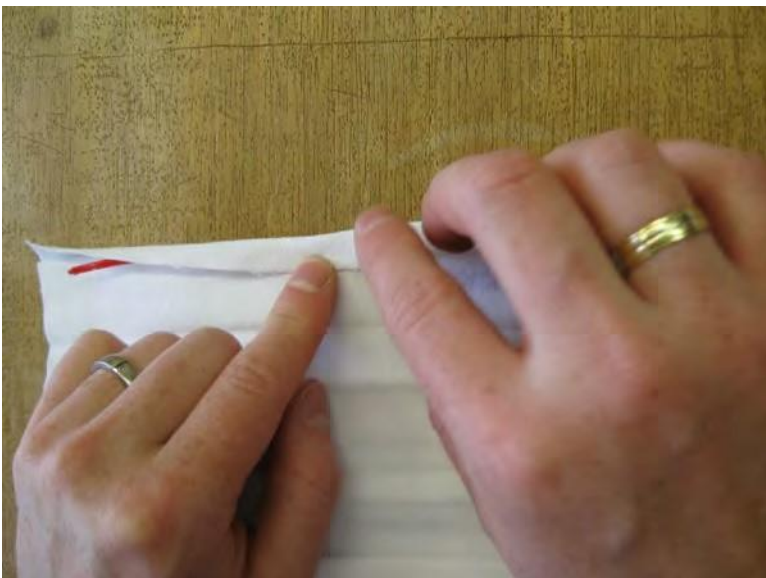


Stofftuch einfassen

LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung



LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung

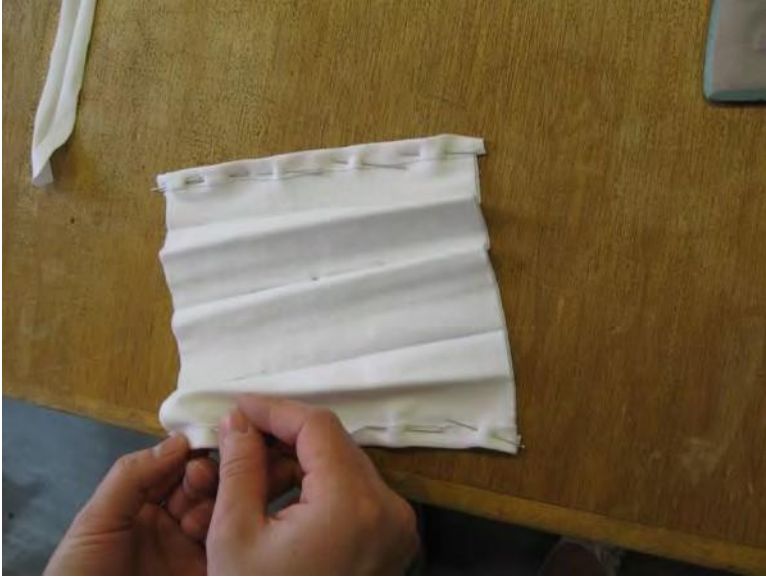


Kantenverstärkungen
feststecken und....



...vernähen.

LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung

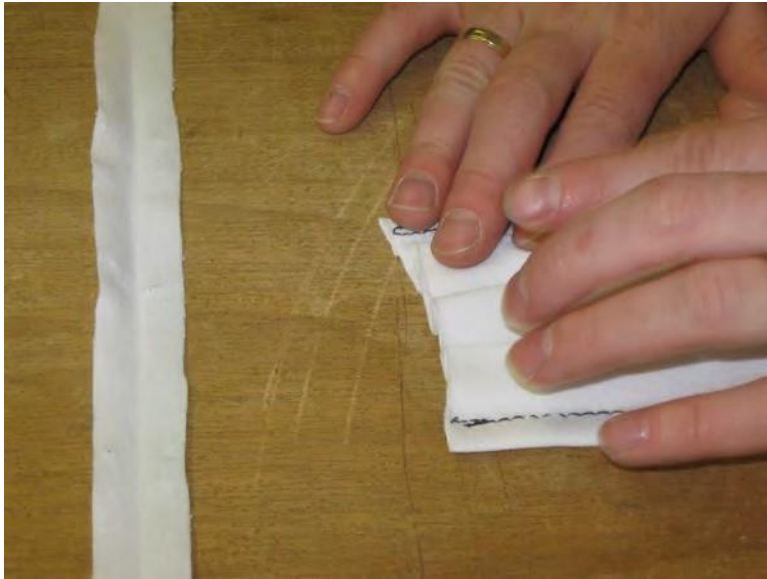

Die eingebügelten Falten des Stofftuchs zusammenlegen und mittig auf beiden Seiten in die Kopfbänder einlegen



Kopfbänder feststecken und...



vernähen.

LZ UGB Stadt Essen – Nähanleitung



1.3 Pflege und Reinigung des Mehrweg- MNS

Der Mehrweg- MNS ist grundsätzlich trocken zu lagern. Nach der Benutzung ist der Mehrweg- MNS vorsichtig ausziehen und möglichst dabei die Außenfläche nicht zu berühren. Nach dem Ausziehen sollte eine Händewaschung durchgeführt werden. Gebrauchte MNS sollten nach der Benutzung bzw. mindestens einmal täglich gereinigt werden. Sie können entweder bei 90°C in der Waschmaschine gewaschen oder auf dem Herd in einem Wasserbad (5 Minuten) ausgekocht werden. Anschließend ist der MNS zu trocknen.

1.2 Prüfung und Wirksamkeit

Dieser Mundschutz wird komplett selbst gefertigt, er ist weder geprüft noch zertifiziert. Er dient nur als sinnvolle Alternative, wenn keine MNS mehr zu bekommen sind. Die Herstellung und Benutzung ist eigenverantwortlich.